


EINSATZGEBIETE UND ANWENDUNG VON GRACEY KÜRETZEN




American Eagle
INSTRUMENTS®

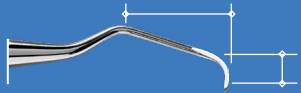


GRACEY KÜRETZEN

Gracey-Küretten sind für bestimmte Bereiche des Zahnes gestaltet, zur subgingivalen Konkremententfernung und zur Wurzelglättung. Der Winkel der Klinge erlaubt ein einfaches Einführen in den Sulcus und minimiert das Gewebe-Trauma.

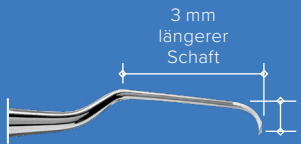


GRACEY DEEP POCKET

Mit einem 3 mm längeren 1. Schaft kann das Instrument zur Reinigung und Wurzelglättung auch bei Taschentiefen von 5 mm oder tiefer eingesetzt werden.

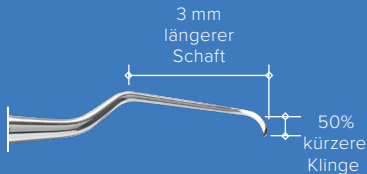

GRACEY ACCESS

Mit einer um 50 % kürzeren Klinge und einem 3 mm längeren Schaft liegt die gesamte Klinge des Instrumentes an der Wurzeloberfläche an. Auch enge Taschen und Furkationen sind so gut erreichbar.

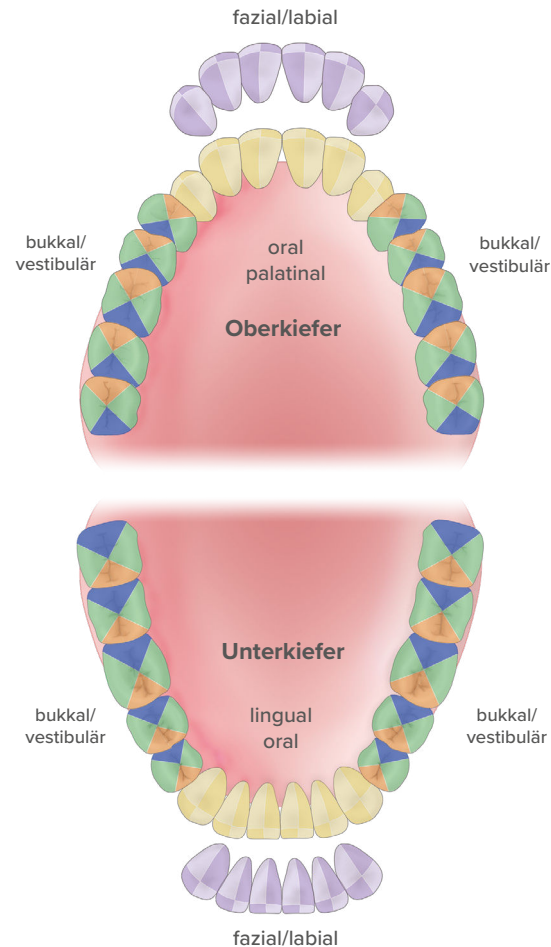


Verwendete Gracey Küretten

00-0	oder	1-2	oder	5-6	oder	7-8	oder	11-12	oder	15-16	oder	13-14	und/oder	17-18
------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-------	------	-------	------	-------	----------	-------

✓ Die systematische Reinigung erfolgt flächenüberlappend

✓ Die Pfeile indizieren die Richtung der Instrumentenspitze

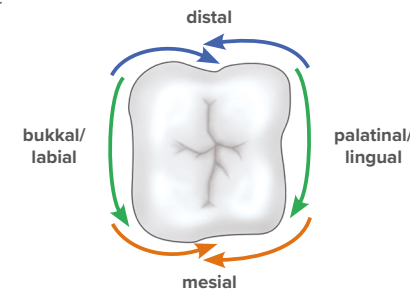

GRACEY

Talon Tough™	XP² Technology™
AEG1-2X	AEG1-2XPXE
AEG5-6X	AEG5-6XPXE
AEG7-8X	AEG7-8XPXE
AEG11-12X	AEG11-12XPXE
AEG15-16X	AEG15-16XPXE
AEG13-14X	AEG13-14XPXE
AEG17-18X*	AEG17-18XPXE*

*ergänzend - für schwer erreichbare distale Flächen

GRACEY DEEP POCKET

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGDP1-2X	AEGDP1-2XPXE
AEGDP5-6X	AEGDP5-6XPXE
AEGDP7-8X	AEGDP7-8XPXE
AEGDP11-12X	AEGDP11-12XPXE
AEGDP15-16X	AEGDP15-16XPXE
AEGDP13-14X	AEGDP13-14XPXE

GRACEY ACCESS

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGA00-0X	AEGA00-0XPXE
AEGA1-2X	AEGA1-2XPXE
AEGA5-6X	AEGA5-6XPXE
AEGA7-8X	AEGA7-8XPXE
AEGA11-12X	AEGA11-12XPXE
AEGA15-16X	AEGA15-16XPXE
AEGA13-14X	AEGA13-14XPXE

SHARPEN
FREE!



Nie mehr schleifen dank der revolutionären XP² Technology™

XP² Technology™ ist ein patentiertes Verfahren zur Oberflächenbehandlung. Die metallurgische Zusammensetzung der Instrumentenoberfläche ist so gestaltet, dass das Material wesentlich haltbarer wird. Dieser Prozess ermöglicht die Herstellung dünner Instrumentenspitzen mit schärferen Klingen. Das zeitintensive Schleifen der Instrumente entfällt.



American Eagle
INSTRUMENTS®



Talon Tough™ Edelstahlinstrumente

American Eagle Talon Tough™ Instrumente überzeugen durch außergewöhnliche Qualität und setzen den Standard in Instrumentendesign und -qualität. Die Instrumente zeichnen sich durch eine hochmoderne Oberflächenbeschaffenheit, eine lange Haltbarkeit, einen hohen Schärfeegrad und einen geringen Schleifaufwand aus.

Typische Gracey Sätze

STANDARD

XP² Technology™

AEGA5-6XPXE

AEGDP7-8XPXE

AEGDP11-12XPXE

AEGDP13-14XPXE

AEG17-18XPXE

+ Scaler

XP² Technology™

AEGA1-2XPXE

AEGA7-8XPXE

AEGA11-12XPXE

AEGA13-14XPXE

+ Scaler

PA und WURZELGLÄTTUNG

PA-Sonden



UNC 15 RUNG
AEPUNC15RBX
Einendig



12 MARQUIS
AEP12BX
Einendig



WHO
AEPWHOBX
Einendig

Tastsonden



DEEP POCKET 11-12
AEEXP11-12DPX

Zum Ertasten von Konkrementen in tiefen Zahnfleischtaschen



ODU 11-12 OLD DOMINION UNIV.
AEEXP11-12X

Zum Ertasten von Konkrementen in tiefen Zahnfleischtaschen

Furkationssonde



NABER 2
AEPN2BX
Furkation