


DOMAINES D'APPLICATION ET D'UTILISATION DES CURETTES GRACEY




American Eagle
INSTRUMENTS®

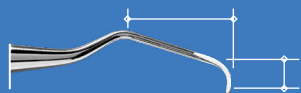


CURETTES GRACEY

Les curettes Gracey sont conçues pour des zones spécifiques de la dent, permettant l'élimination des dépôts sous-gingival et le surfaçage radiculaire. L'angle de la lame facilite l'insertion dans le sulcus, tout en minimisant le traumatisme des tissus.

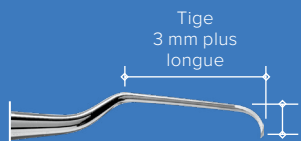


GRACEY DEEP POCKET

Avec une première tige plus longue de 3 mm, l'instrument peut être utilisé pour le nettoyage et le surfaçage radiculaire dans les poches parodontales de 5 mm ou plus.

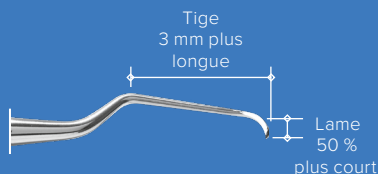

GRACEY ACCESS

Avec une lame raccourcie de 50 % et une tige plus longue de 3 mm, toute la longueur de la lame s'adapte à la surface radiculaire. Ainsi, même les poches étroites et les zones de furcation sont facilement accessibles.

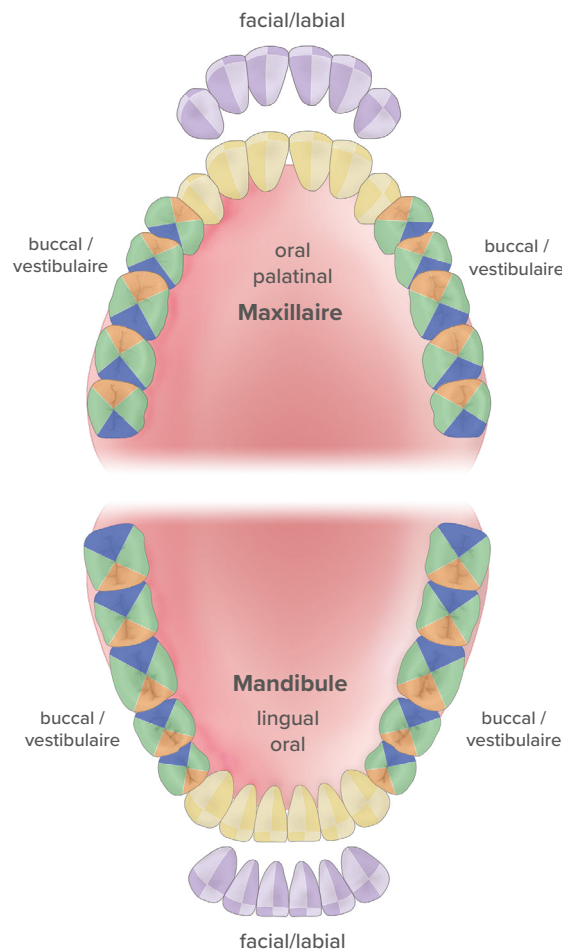


Curettes Gracey utilisées

00-0	00-0
1-2	1-2
5-6	5-6
7-8	7-8
11-12	11-12
15-16	15-16
13-14	13-14
17-18	17-18

✓ Le nettoyage systématique s'effectue en recouvrant les surfaces.

✓ Les flèches indiquent la direction de la pointe de l'instrument.

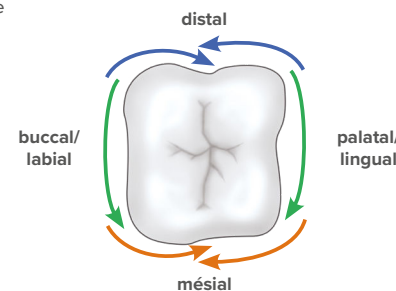

GRACEY

Talon Tough™	XP² Technology™
AEG1-2X	AEG1-2XPXE
AEG5-6X	AEG5-6XPXE
AEG7-8X	AEG7-8XPXE
AEG11-12X	AEG11-12XPXE
AEG15-16X	AEG15-16XPXE
AEG13-14X	AEG13-14XPXE
AEG17-18X*	AEG17-18XPXE*

* complément – pour les surfaces distales difficiles d'accès

GRACEY DEEP POCKET

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGDP1-2X	AEGDP1-2XPXE
AEGDP5-6X	AEGDP5-6XPXE
AEGDP7-8X	AEGDP7-8XPXE
AEGDP11-12X	AEGDP11-12XPXE
AEGDP15-16X	AEGDP15-16XPXE
AEGDP13-14X	AEGDP13-14XPXE

GRACEY ACCESS

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGA00-0X	AEGA00-0XPXE
AEGA1-2X	AEGA1-2XPXE
AEGA5-6X	AEGA5-6XPXE
AEGA7-8X	AEGA7-8XPXE
AEGA11-12X	AEGA11-12XPXE
AEGA15-16X	AEGA15-16XPXE
AEGA13-14X	AEGA13-14XPXE

SANS
AFFÛTAGE !



Fini l'affûtage, grâce à la XP² Technology™ révolutionnaire

La XP² Technology™ est un procédé breveté de traitement de surface. La composition métallurgique de la surface des instruments est conçue de façon à rendre le matériau nettement plus durable. Ce procédé permet la fabrication de pointes d'instruments plus fines, dotées de lames plus tranchantes. L'affûtage fastidieux des instruments n'est plus nécessaire.



American Eagle
INSTRUMENTS®



Instruments en acier inoxydable Talon Tough™

Les instruments Talon Tough™ d'American Eagle séduisent par leur qualité exceptionnelle et font figure de référence en matière de conception et de qualité. Les instruments se distinguent par une finition de surface à la pointe de la technologie, une durabilité remarquable, un tranchant de qualité supérieure et un besoin d'affûtage minimal.

Ensembles Gracey courants

STANDARD

XP² Technology™

AEGA5-6XPXE

AEGDP7-8XPXE

AEGDP11-12XPXE

AEGDP13-14XPXE

AEG17-18XPXE

+ Détartreur

XP² Technology™

AEGA1-2XPXE

AEGA7-8XPXE

AEGA11-12XPXE

AEGA13-14XPXE

+ Détartreur

PARODONTIE et
SURFAÇAGE
RADICULAIRE

Sondes parodontales



UNC 15 RUNG
AEPUNC15RBX
À une extrémité



12 MARQUIS
AEP12BX
À une extrémité




WHO
AEPWHOBX
À une extrémité

Sonde exploratrices



DEEP POCKET 11-12
AEEXP11-12DPX


Pour le repérage des dépôts de tartre dans les poches parodontales.

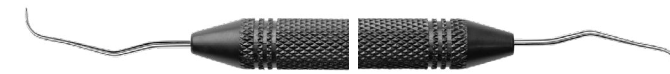

ODU 11-12 OLD DOMINION UNIV.
AEEXP11-12X

Pour le repérage des dépôts de tartre dans les poches parodontales.

Sonde de furcation

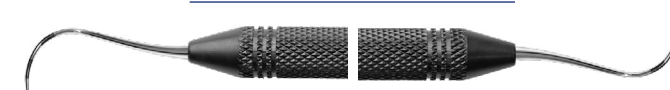

NABER 2
AEPN2BX
Furcation