


TOEPASSING EN GEBRUIK VAN GRACEY CURETTES




American Eagle
INSTRUMENTS®

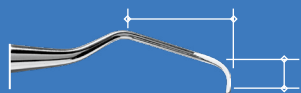


GRACEY CURETTES

Gracey curettes zijn aangepast aan de specifieke anatomische vormen van de tanden en worden gebruikt voor subgingivale scaling en rootplaning. De hoek van het werkblad zorgt voor een optimale toegang tot de sulcus met minimaal trauma aan de gingiva.

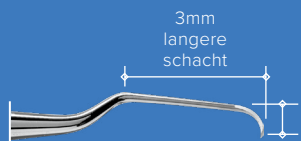


GRACEY DEEP POCKET

De terminale schacht is 3 mm langer en daardoor bijzonder geschikt voor scaling en rootplaning in pockets van 5 mm of dieper.

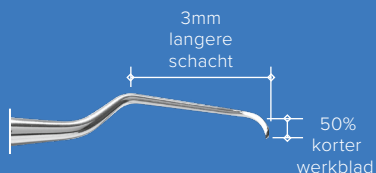

GRACEY ACCESS

Dankzij het werkblad met een halve standaardlengte en de 3 mm verlengde terminale schacht is de toegang tot smalle pockets en furcaties aanzienlijk eenvoudiger.

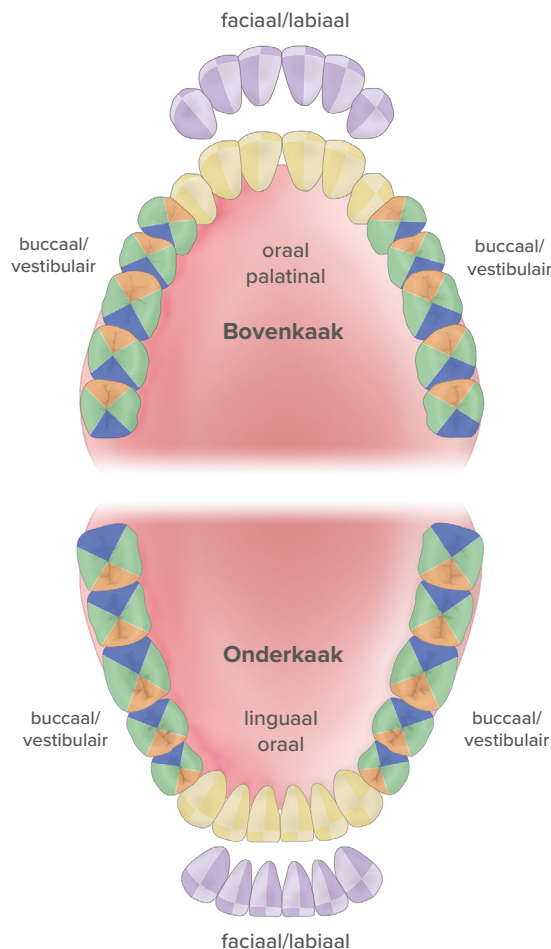


Te gebruiken Gracey Curettes

00-0	00-0
1-2	1-2
5-6	5-6
7-8	7-8
11-12	11-12
15-16	15-16
13-14	13-14
17-18	17-18

✓ De systematische reiniging gebeurt met overlappende bewegingen.

✓ De pijlen tonen de richting van de instrumententip.

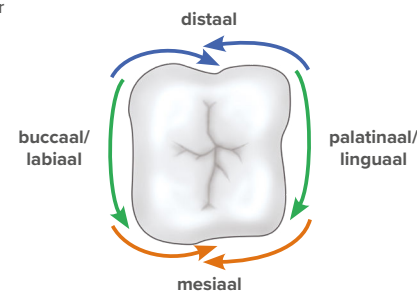

GRACEY

Talon Tough™	XP² Technology™
AEG1-2X	AEG1-2XPXE
AEG5-6X	AEG5-6XPXE
AEG7-8X	AEG7-8XPXE
AEG11-12X	AEG11-12XPXE
AEG15-16X	AEG15-16XPXE
AEG13-14X	AEG13-14XPXE
AEG17-18X*	AEG17-18XPXE*

*aanvullend - voor moeilijk bereikbare distale gebieden

GRACEY DEEP POCKET

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGDP1-2X	AEGDP1-2XPXE
AEGDP5-6X	AEGDP5-6XPXE
AEGDP7-8X	AEGDP7-8XPXE
AEGDP11-12X	AEGDP11-12XPXE
AEGDP15-16X	AEGDP15-16XPXE
AEGDP13-14X	AEGDP13-14XPXE

GRACEY ACCESS

Talon Tough™	XP² Technology™
AEGA00-0X	AEGA00-0XPXE
AEGA1-2X	AEGA1-2XPXE
AEGA5-6X	AEGA5-6XPXE
AEGA7-8X	AEGA7-8XPXE
AEGA11-12X	AEGA11-12XPXE
AEGA15-16X	AEGA15-16XPXE
AEGA13-14X	AEGA13-14XPXE

SHARPEN
FREE!



Nooit meer slijpen dankzij de revolutionaire XP² Technology™

XP² Technology™ is een gepatenteerd oppervlaktebehandelingsproces. Dankzij de unieke metallurgische samenstelling van het instrumentoppervlak blijft de snijkant aanzienlijk langer scherp en wordt het instrument duurzamer. Dit proces maakt het mogelijk om dünnere tips met uiterst scherpe snijkanten te produceren.

Hierdoor behoort het tijdrovend naslijpen tot het verleden.



American Eagle
INSTRUMENTS®



Talon Tough™ roestvrijstalen instrumenten

American Eagle Talon Tough™-instrumenten onderscheiden zich door hun uitzonderlijke kwaliteit en zetten de standaard op het gebied van instrumentdesign en duurzaamheid. De instrumenten kenmerken zich door geavanceerde oppervlakte-eigenschappen, langdurige scherpheid en een hoge slijtvastheid, waardoor naslijpen aanzienlijk minder vaak nodig is.

Typische Gracey sets

STANDAARD

XP² Technology™

AEGA5-6XPXE

AEGDP7-8XPXE

AEGDP11-12XPXE

AEGDP13-14XPXE

AEG17-18XPXE

+ Scaler

XP² Technology™

AEGA1-2XPXE

AEGA7-8XPXE

AEGA11-12XPXE

AEGA13-14XPXE

+ Scaler

PARO en ROOTPLANNING

Pocketsondes



UNC 15 RUNG
AEPUNC15RBX
Enkeleindig



12 MARQUIS
AEP12BX
Enkeleindig



WHO
AEPWHOBX
Enkeleindig

Sondes (explorer)




DEEP POCKET 11-12
AEEXP11-12DPX
Voor het sonderen in diepe pockets



ODU 11-12 OLD DOMINION UNIV.
AEEXP11-12X
Voor het sonderen in diepe pockets

Furcatiesonde

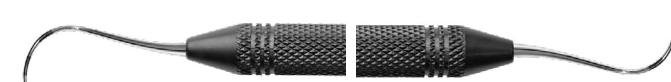

NABER 2
AEPN2BX
Furcatie